

「みんなの為！」 「自分の為！」 「検温習慣！」

測太郎Ⅱ

非接触型 デジタル「検温」モニター



※タブレットはオプションです。



お知らせ温度設定機能付き！

※タブレットで遠隔監視が可能！

※付属ケーブルを使えば、モバイルバッテリーで動作可能！

日本製
MADE IN JAPAN

お問い合わせ先

<受付時間>午前9時～午後5時
土・日・年末年始を除く

製造



株式会社 エッチ・エム・イー

〒511-0911三重県桑名市額田292番地

TEL 0594-87-5650/FAX 0594-33-3081

販売



マックスエレクトロニクス株式会社

〒140-0014東京都品川区大井1-11-6 寺崎ビル3F

TEL 03-3776-0611/FAX 03-3776-0612


お客様の声を反映したNEW検温モニター



- ・ 据え置き型で測定者不要・人件費削減
- ・ 高速温度測定でスクリーニングに最適
- ・ 温度表示が大きく見やすい
- ・ 組立、操作、設定が簡単
- ・ 規定温度を超えた場合、赤色LEDが点灯
- ・ タブレットで遠隔監視が可能
(遠隔で検温監視ができます) ※オプション
- ・ モバイルバッテリーを用意すれば
電源のないところでも動作可能
※モバイルバッテリーは付属しません

製品仕様

製品名	デジタル検温モニター 測太郎 II
型番	SSM-200X
寸法・質量	398×300×180mm / 3.2Kg
付属品	センサー、表示パネル、ACアダプター、台座、モバイルバッテリー用ケーブル
測定視野特性	15～20cmの距離 / φ7cmの範囲
検温モード 測定範囲	35～42℃
物温モード 測定範囲	15～65℃
精度	±0.3℃
測定速度	1.0秒以内

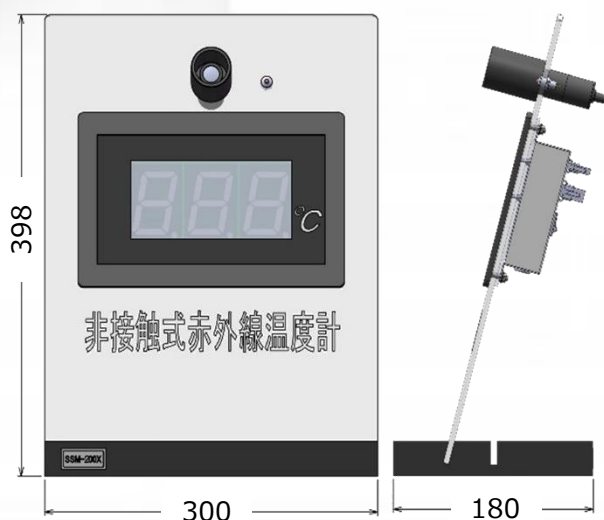

ケーブル仕様	(入力) USB Type-A 5V 2A , (出力) 測太郎 II 電源コネクタ		
動作時間 (モバイルバッテリー)	5000mAh : 10～25時間 ※動作時間は目安であり、使用状況によって異なります		
タブレット仕様	専用ソフトをインストールしたタブレットをご提供致します		
OS	Android	通信システム	Bluetooth



ご注意

- ・ 人の体表面温度は外気の影響を受けますので、一般的に体温より低くなります。
- ・ 測定される際には測太郎の置かれている部屋の環境に体が十分馴染んだ状態で測定下さい。
- ・ 額を測る際には額の中心をセンサーから15cmから20cm程度離れて測定下さい。
- ・ マスク、眼鏡がセンサーの視野に入らない様に測定下さい。
- ・ 設置場所は温度が安定する直射日光のあたらない場所に設置下さい。
- ・ オプションのタブレットを使用する際に遮蔽物等で通信が正常に作動しない場合もあります。

※測太郎 II は薬機法で定める
「体温計」ではありません。

※予告なく仕様変更することがあります。
※タブレットは写真と異なる事があります。

代理店